


## Návod k použití


### Smart Set 001.4

Nejprve Smart Set naplňte fyziologickým roztokem či jinou intravenózní kapalinou. Doporučuje se naplnit do i.v. hadičky a pažní žíly nejméně 20 cm<sup>3</sup> roztoku kontrastní látky. Na počátku se injekční stříkačka naplní 30 cm<sup>3</sup> roztoku, u Smart Setu je možné nejdříve začít se 6 cm<sup>3</sup> roztoku, vyzkoušet jednou či dvakrát i.v. hadičku se 2 cm<sup>3</sup> roztoku pomocí injekční stříkačky a nechat si 20 cm<sup>3</sup> pro naplnění gadoliniem do hadičky.


1. Odstraňte ochranné kloboučky
2. Připojte stříkačku s roztokem
3. Naplňte Smart Set roztokem

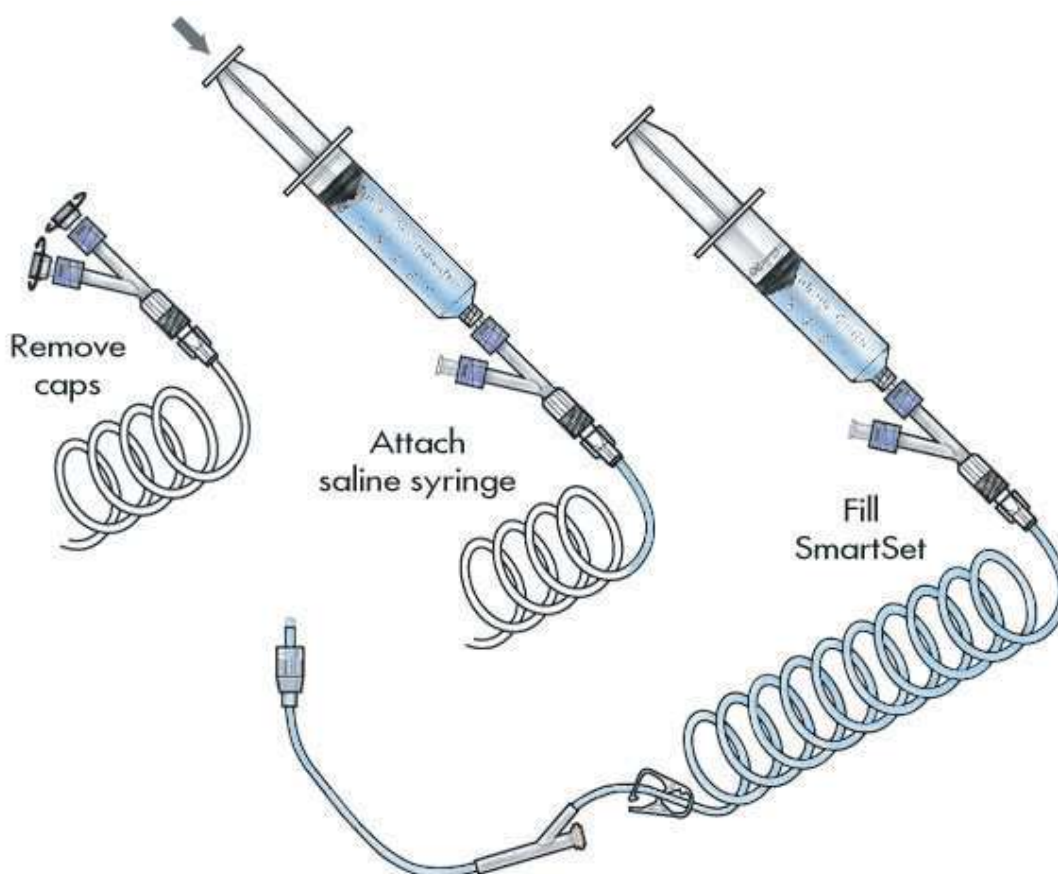


4. Připojte Smart Set (přítlačte) k intravenóznímu katétru

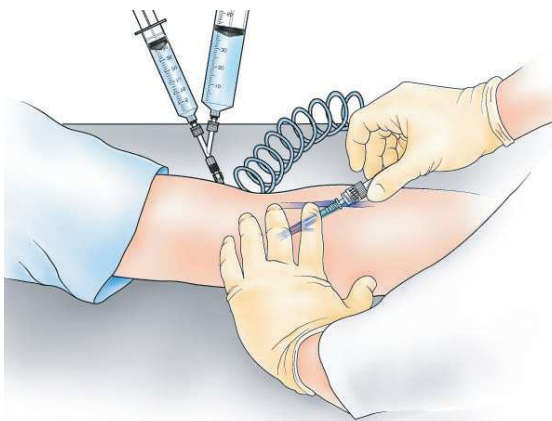

5. Uzamkněte Smart Set k angiokatétru pootočením doprava ve směru hodinových ručiček

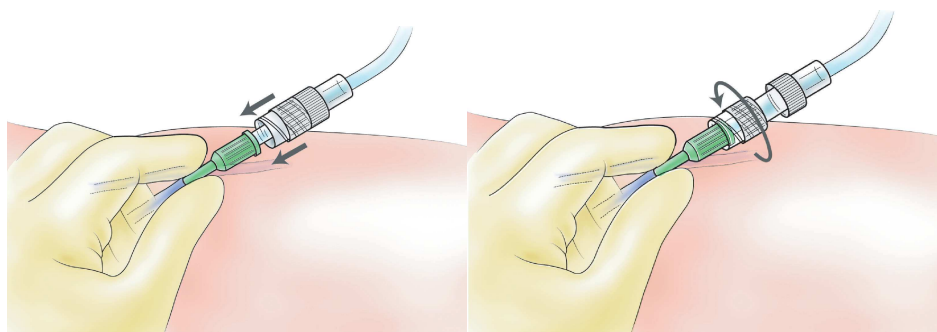

6. Přelepte 3 - 4 proužky náplasti, aby nedošlo k porušení struktury pohybem

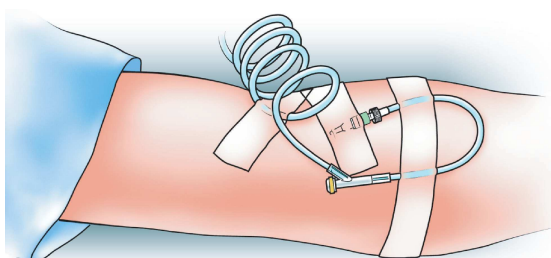


7. Chcete-li vyzkoušet i.v. hadičku:

- Vstříkněte fyziologický roztok
- Neměl by zde být žádný odpor


Při odsávání:

- Odstraňte Y komplet a připojte injekční stříkačku přímo na konec hadičky
- Zatáhněte za píst injekční stříkačky, až je v hadičce vidět červená tekutina
- Vždy propláchněte Smart Set fyziologickým roztokem, aby se vyčistila krev z hadiček a nedošlo tak ke krevním sraženinám

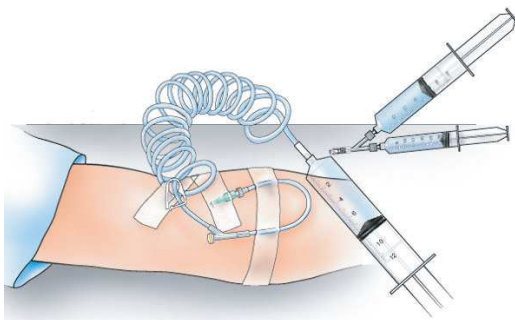

8. Napojení i.v. hadičky:

- Odstraňte Y komplet (koncový vnitřní kryt, aby se zabránilo kontaminaci)
- Připojte i.v. hadičku
- Používejte malé i.v. sáčky (250 cm<sup>3</sup>), aby se nedostalo dovnitř nedopatřením příliš mnoho tekutiny
- Pokud je vše připraveno ke vstříknutí, připojte znovu komplet Y

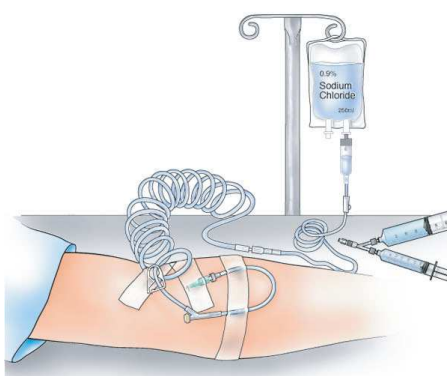

9. Pokud jste dokončili MRA (Magnetickou Rezonanční Angiografii):

- Nasadte svorku před odstraněním tak, aby tekutina z hadičky nekapala ven
- Nalepte gázu přes vpich, aby se zabránilo krvácení
- Ujistěte se, že všechny jehly jsou uloženy v kontejneru pro ostré předměty

Výrobce: Topspins Inc. , USA